

## 高さ調節可能



① 固定されているネジ2つを外します。



② 脚パーツを取り外します。



③ 好きな高さに合わせ、脚パーツをはめ込みます。



④ 2つのネジでしっかり固定します。


ご注意：

※高さを変える際は、ベッドの上に物を置かないでください。

※不安定な場所での作業は大変危険ですのでお控えください。



## マッサージベッドの閉じ方・移動方法

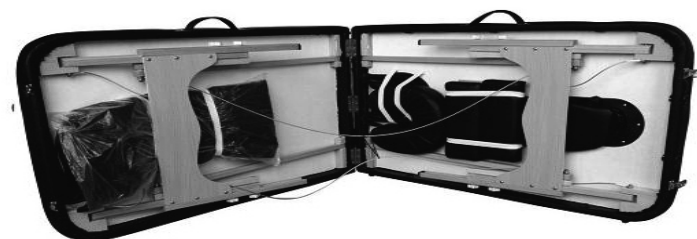

1. マッサージ台は横にしてたたみます。
2. 脚をテーブルの下に折りたたみます。
3. 台を半分にして、金具で閉じます。

# マッサージベッド 説明書

1. マッサージベッドの開閉は2人で行ってください。
2. ご使用前にネジが閉まっているか確認してください。
3. 当商品は常に平らな安定した場所に設置してください。すべての脚が安定されているか確認してください。重大な事故につながる恐れがあります。
4. マッサージベッドは定期点検を行ってください。すべてのネジがしっかりしまっているか、ワイヤーが擦り切れていないか、脚に亀裂などか入っていないか確認してください。
5. マッサージベッドに極端な負荷はかけないでください。重大な事故につながる恐れがあります。指をすき間や留め具に置かないようにしてください。
6. マッサージベッドのお手入れは固く絞った布でふいてください。アルコールなどを元にしたクリーナーの使用は生地を傷める原因になります。



1-1. 留め具を外します。




1-2. 台を横にして広げます。



2. 脚を広げます。




3. まっすぐにします。

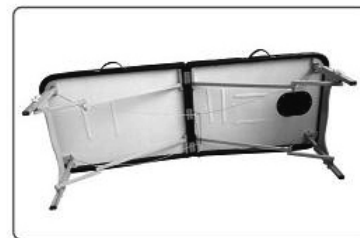

4. マッサージベッドをおこします。



5-1. アームレストの一端を棒につるします。

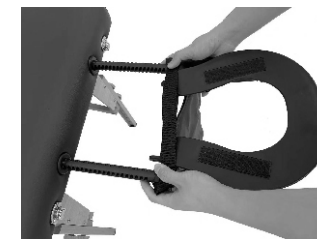

5-2. ヘッドレストの棒を穴にさします。



5-3. ヘッドレストの高さと角度を自分の具合に合わせて調節し、ハンドルをロックします。



5-4. アームレストの一端をヘッドレストの下を通して貼り付けます。



5-5. ヘッドレストの上に枕を置きます。